

# e-Patronus SOS Digi Watch 4G - V46C

## Felhasználói kézikönyv



## Tartalom

### **1. Termékáttekintés**

- 1.1 A készülékről általában
- 1.2 A készülék részei
- 1.3 A készlet tartalma
- 1.4 Előzetes információk
- 1.5 A készülék akkumulátorának feltöltése

### **2. Használatba vétel első lépései**

- 2.1 A távoli menedzseléshez szükséges mobil applikáció (APP) letöltése
- 2.2 Bejelentkezés az APP-on és a készülék hozzáadása

### **3. Az alkalmazás (APP) ismertetése**

- 3.1 A készülék paraméterezése /beállítások (Settings)
- 3.2 Helyzet meghatározás / Nyomkövetés
- 3.3 Egészségügyi (Healthy) megfigyelés funkciók
- 3.4 Conversation (társalgás)
- 3.5 Alarm list (riasztási eseménytár)
- 3.6 Remind setting (Beállítás emlékeztető)
- 3.7 Fényképkészítés
- 3.8 FAQ
- 3.9 LOG OUT

### **4.0 A készülék használata**

- 4.1 Az üzembe helyezés lépései
- 4.2 Az SOS hívás
- 4.3 Normál hívás telefonkönyvből
- 4.4 A készülék felhívása
- 4.5. Elesésriasztás
- 4.6. Egészségügyi megfigyelés
- 4.7 A készülék hardware üzembe helyezés – SIM csere

- 5. Hibajelenségek és teendők
- 6. Készülék be- kikapcsolása
- 7. Fontos megjegyzések

# 1. Termékáttekintés

## 1.1 A készülékről általában

Az e-Patronus SOS Digi Watch 4G V46C egy digitális karórába integrált új generációs (GPS/WIFI/(LBS)/GPRS/4G/GSM) alkaron, óraként viselhető közvetlen segélyhívó, egészségügyi megfigyelő, kommunikációs és nyomkövető eszköz bármely korosztály részére; de különösen az idős egyedül élő felnőttek számára ajánlott.

Kivételes jellemzője a kis méret, esztétikus megjelenés, többféle funkcionális képesség és a megbízhatóság.

Az SOS Digi Watch 4G V46C indoor-outdoor eszköz, amely lakáson belül és azon kívül, bárhol használható.

A működés feltétele alapvetően GSM (egyes funkciók eléréséhez és a menedzseléshez 2G/4G adatkapcsolat is!) kapcsolat.

A por és vízállóság szempontjából IP 65 besorolású, vagyis porálló és cseppenő víz ellen védett.

Az SOS Digi Watch 4G V46C kezelését a használatnak a szükséges mértékben meg kell tanítani, annak érdekében, hogy az egyes funkciókat megfelelően tudja használni.

Az SOS Digi Watch 4G V46C a szokásos digitális karórákhoz hasonló kialakítású, mérete is nagyjából azonos velük. A készülék felső oldalán az OLED kijelző, jobb oldalán két mechanikus nyomógomb, a bal oldalán a SIM takaró fedél, hátoldalán az lézeres elektronikai érkélő és a mágneses töltő pontsor található. (Részletes ismertető később).

Az SOS Digi Watch 4G V46C készüléket az alkaron, közvetlen a csukló felett kell rögzíteni (mint egy karórát) az „órárésszel” egybe épített karkötővel. A készülék kialakítása és anyaga a folyamatos viselésre lehetőséget ad, de fürdéskor célszerű lecsatolni, mivel víz alá mártani nem szabad!

### **Fontos!**

**A készülék nem orvosi mérőműszer, éppen ezért nem helyettesíti az orvosi mérőműszereket.**

A készülék további specialitása, hogy érzékeli és figyelmeztetést küld a karról történő eltávolítása esetén!

**Fontos! A készülékhez magyar nyelvű dokumentációja elektronikusan, szállításkor biztosított linken érhető el. Az angol nyelvű (eredeti) dokumentáció papír alapon szintén megtalálható a csomagban. Amennyiben a két féle dokumentáció közt ellentmondás tapasztalható, az eredeti dokumentáció az irányadó!**

## 1.2 A készülék részei



Az ábra csak az elektronikus egységet mutatja a kiegészítő töltő nélkül!

## 1.3 A készlet tartalma

| Megnevezés                                 | Mennyiség (db) |
|--------------------------------------------|----------------|
| e-Patronus SOS Digi Watch 4G V46C + SIM    | 1              |
| Töltő adapter + USB töltő kábel (mágneses) | 1              |
| Csavarhúzó (mini)                          | 1              |
| Karkötő egyben a készülékkel               | 1              |
| A magyar leírások linken                   | 1              |
| User manual angolul                        | 1              |
| Garancia jegy                              | 1              |

## 1.4 Előzetes információk

A későbbi félreértések elkerülése érdekében a készüléket minden esetben már behelyezett SIM kártyával, gyári szám címkével lezárva szállítjuk. A címke sérülés nélkül eltávolíthatatlan. Kérjük, a garancia idő alatt azt semmiképpen ne távolítsa el, mert az garanciavesztéssel jár!

A készülék megbontása, víz alá merítése ugyancsak a garancia elvesztésével jár!

A működéshez szükséges nano-SIM kártya mobil GSM és 2G/3G/4G adatkapcsolatot biztosító, aktív, egyenleggel rendelkező (feltöltős kártyával szállítjuk!). Előzetesen az alábbi beállításokat végezzük el:

- PIN kódkérés tiltás,
- pontos idő beállítás automatikusan a szolgáltató hálózatról
- a mobil internet kapcsolathoz szükséges APN beállítása a készüléken.

A készülék megvásárlása esetén a SIM kártyát induló feltöltéssel térítésmentesen biztosítjuk. A névre szóló SIM kártyát az általunk megadott információk alapján a kártya szolgáltatójánál (jelenleg az üzemeltetési költség szempontjából legkedvezőbb Telekom) a vásárlónak előzetesen interneten keresztül aktiválnia kell.

Lehetőség van arra is, hogy a vásárló saját SIM kártyát használjon a készülékben. Ebben az esetben a működőképes SIM kártyát előzetesen vagy legkésőbb a vásárláskor rendelkezésünkre kell bocsátania.

E fenti műveletek elvégzése érdekében természetesen a készülék akkumulátorának első feltöltését elvégezzük.

A garancia idő lejártával a használt SIM kártya igény szerint másikra cserélhető (kártya független a készülék), ne feledje azonban a használatba venni kívánt SIM kártyát az előzőekben ismertetett módon előkészíteni illetve a szükséges módosításokat a későbbiekben leírtaknak megfelelően elvégezni.

Előfordulhat, hogy a behelyezett SIM működik, de híváskor és/vagy SMS küldéskor nem küldi a SIM kártya telefonszámát, hiába van aktiválva a számküldés funkció. Ez általában nem a készülék hiányossága. A jelenség esetén hívja fel a SIM kártya szolgáltatójának diszpécserét, mondja el a problémát, adja meg a SIM telefonszámát és a készülék IMEI számát. **Ezek ismeretében a diszpécser köteles a számküldést aktiválni!**

A készülék megvásárlását követően a kicsomagolt készüléket mindenképpen vizsgálja meg. Csak a sérülésmentes és minden tartozékot tartalmazó készüléket vegyen használatba.

## 1.5 A készülék akkumulátorának feltöltése

A csomagban található kábel normál USB csatlakozós végét dugja a töltő adapterbe, majd azt a szabványos 230 V AC hálózati csatlakozó aljzatba. A biztonsági és életvédelmi szabályokat szigorúan tartsa be! Lásd általános tájékoztató fáj! A kábel másik (mágneses felét érintse a készülék hátoldalán található érintkezőkhöz. Amennyiben az elhelyezési irány helyes, az érintkezők vonzzák egymást, ellenkező esetben pedig taszítják egymást.

A maximális akkumulátor feltöltési ideje a töltési áram függvényében 3-4 óra. A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje a készülék kijelzőjén és a menedzseralkalmazáson belül ellenőrizhető.


Egy teljes feltöltést követően a készenléti üzemidő akár 72 óra is lehet. Az akkumulátor üzemidejét a használt operációk (ellenőrzések, üzemmód, telefonálás stb.) jelentősen befolyásolja.

## 2. Használatba vétel első lépései

### 2.1 A távoli menedzseléshez szükséges mobil applikáció (APP) letöltése

A készülék okos telefonról történő távoli menedzseléséhez ingyenes applikáció áll rendelkezésre. Az alkalmazás neve **AnyTracking**.

Az APP az okos telefonjának megfelelő APP áruházból letölthető. A keresőbe az AnyTracking kifejezést beírva a megjelenő listában válassza ki az AnyTracking GPS Tracker APP alkalmazást, telepítse, indítsa el. Az alkalmazás nyitó oldala jelenleg az alábbi:

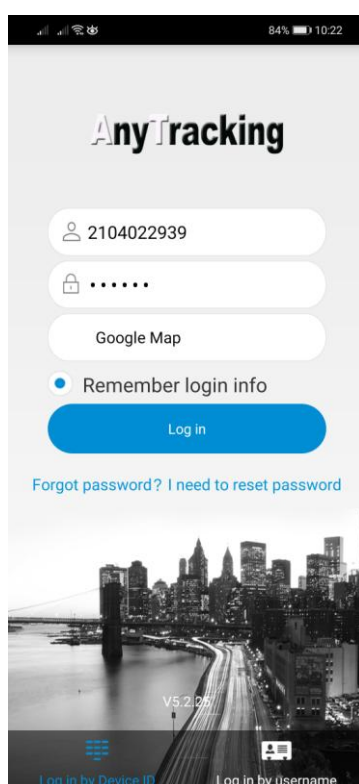

### Fontos információ – 2022.04.15-től

Amennyiben az Any Tracking alkalmazás használata során az adatkapcsolatban lassulást vagy bizonytalanságot tapasztal, letöltheti és használhatja a **ReachFar** nevű, szintén ingyenes alkalmazást is!

Az alábbi ismertetés mindkét alkalmazásra egyaránt érvényes és követendő.

## 2.2 Bejelentkezés az APP-on és a készülék hozzáadása

Két belépési mód lehetséges

1. belépés készülék ID számmal
2. belépés felhasználó névvel

**Mi az elsőt javasoljuk, ezért csak azt ismertetjük.**

✧ Az APP-on történő belépéshez kövesse az alábbiakat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fejlesztő fenn tartja a jogot arra vonatkozóan, hogy minden külön értesítés nélkül az alkalmazás külső megjelenésében, egyes funkciók elérési lehetőségében változtasson! Előfordulhat, hogy az alkalmazás iOS illetve Android változata kismértékben eltérő megjelenésű!

- Rögzítse az első sorban a készülékhez csatolt címkén található ID számsort.
- Írja be a belépési jelszót a második sorba, mely a gyári beállítás szerint „123456”, majd kattintson „Log in” sorra. A belépési kódszámsort a „Settings” menü „Change password” sorában tudja módosítani. (Csak a biztonságos kezelés megtanulása után javasolt a változtatás!)


**Nagyon fontos!** Az ID számot (user name) és a módosított jelszót (password) jól jegyezze meg, s ellenőrizze a helyességét. Ezt úgy teheti meg, hogy kilép az alkalmazásból (nemcsak bezárja), majd ismét belép.

**A felhasználó név és a jelszó személyes adat, melynek elvesztése vagy elfelejtése a vásárló felelőssége.**

**Minden további vita elkerülése végett csak olyan készüléket tudunk garanciális időn belül vagy azon túl visszavenni, javítani, cserélni, melynek IMEI illetve ID szám szerinti re-installációját a vásárló részünkre biztosítja.**

**Amennyiben a belépés sikeres, folytathatja a készülék beállítási műveleteit.**


Ehhez menü-választó oldalon válassza a „Settings” menü pontot.

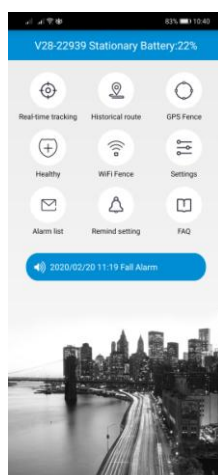

### 3. Az alkalmazás (APP) ismertetése

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék és a menedzselő APP számos funkcionális lehetőséget biztosít, melyek részletes szöveges bemutatása e keretek közt lényegesen bonyolultabb lenne, mint az APP felhasználó általi részletes áttanulmányozása és megismerése. Ezért bizonyos kiegészítő funkciók tárgyalásától e helyütt eltekintünk!

#### 3.1 A készülék paraméterezése /beállítások (Settings)

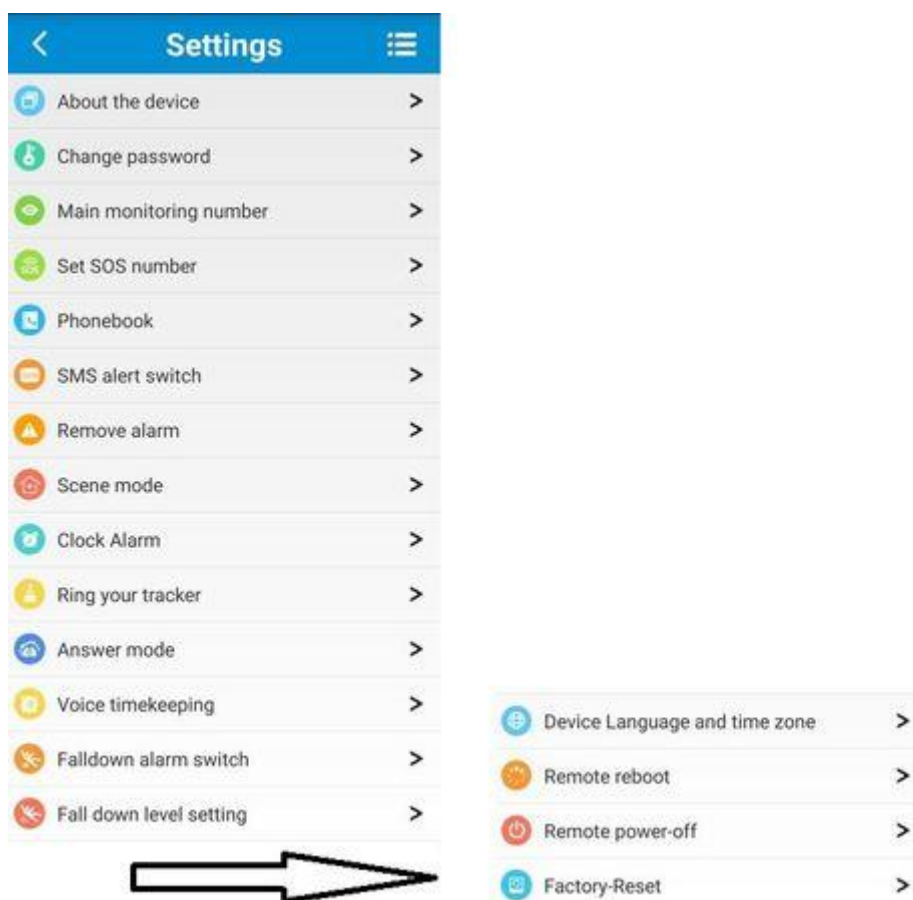

**About the device** – A készülékkel kapcsolatos legfontosabb információkat mutatja. (készüléknév, ID azonosító szám, model, SIM kártya telefonszáma, stb). **Figyelem!** Az oldalon bizonyos sorok szerkeszthetők (név, telefonszám, kapcsolat, kapcsolati telefonszám, LBS, WiFi szűrés). Amennyiben Ön programozza fel a készüléket, vagy SIM kártyát cserél, a készülékbe helyezett SIM kártya telefonszámát a **'Device phone number'** sorban feltétlen rögzíteni szükséges!

| About the device     |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Device name:         | V28-22939                           |
| Device ID:           | 2104022939                          |
| ICCID:               |                                     |
| Expiry date:         | 2030-02-11                          |
| Device model:        | V28                                 |
| Device phone number: | +36706541802                        |
| Contact:             |                                     |
| Contact number:      |                                     |
| Filter LBS           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filter WiFi          | <input type="checkbox"/>            |

A készüléknek saját nevet adhat, például: Nagy SOS karperec, a készüléknek meg kell adnia a behelyezett SIM kártya telefonszámát, melynek formátuma mindig +3620.... vagy +3630... vagy +3670.. legyen! A kontaktnevet és telefonszámot nem kötelező megadni. Az LBS (földfelszíni) és WiFi helymeghatározási **szűrő** gombok választhatók. Ne feledje az LBS általában a legpontatlanabb helymeghatározó adatot szolgáltatja, ezért indokolt lehet kiszűrni!

A beállítások végén ne feledkezzen meg a mentésről. A mentés sikerességét az alkalmazás megerősíti.

**Change password** – Ezen az oldalon van lehetőség a gyári jelszó módosítására. A régi jelszó beírását követően, az új jelszót két sorban is rögzíteni kell, melyet a „Submit” sorra kattintva küld el a szerverre.

**Set SOS numbers** - a készülékben 3 telefonszámot rögzíthet fontossági sorrendben, vegye figyelembe az 1,2,3 pozíciót.

**Phonebook** – 15 név szerinti telefonszámot tölthet fel a készülék telefonkönyvébe.

**SMS alert switch** – „on” állásban riasztáskor SMS küldés is történik. Kérjük feltétlen tesztelje ezt a funkciót, amennyiben feleslegesnek találja a választó „turn off” gombot jelölje.

**Remove alarm** – a lecsatolásának figyelése. A készülék kb. 3 percenként teszteli az állapotot. Amennyiben két egymást követő teszt eredménye pozitív, az eltávolítás információ megjelenik az alkalmazás esemény listában. Figyelem a folyamatosan bekapcsolt állapot az akkumulátor üzemidejét csökkenti!

**Scene mode** – a riasztás megjelenítése módja a készüléken. 4 lehetséges mód választható: 1. rezgés és hang, 2. csak hang, 3. csak rezgés. 4. halk. A javasolt beállítás: „Vibration & sound”.

**Clock alarm** – ébresztő óra funkció 3 lehetőséggel: egyszeri alkalom, naponta egyszeri, egy hétre előre ütemezhető.

**Ring your tracker** – a készülék távolról történő megcsengetése elkeverés esetére. Ha ezt a funkciót akarja használni, a **Scene mode** beállítás legyen „Vibration & sound” vagy „Sound only”.

**Answer mode** – a bejövő hívás fogadásának módja: 1. **Press to answer** (gomb megnyomással), 2. **Handsfree auto answer** (automatikus). Javasolt beállítás: automatikus.

**Voice timekeeping** – pontos idő bemondása angolul. Ha zavaró jelölje a „turn off” választó gombot.


**Falldown alarm swirch** – az automatikus elesés érzékelés bekapcsolása. Javasolt beállítás: ON-ON amennyiben használni kívánja, OFF-OFF ha pedig nem!

**Falldown level setting** – az automatikus elesés érzékelés érzékenység beállítása. Tapasztalati úton válassza ki a megfelelő érzékenységet. A kicsi fekete háromszög ikonhoz érintve, 6 szint közt választhat.

Amennyiben ezt a funkciót bekapcsolja a készülék elesés érzékelés esetén rövid késleltetéssel fog riasztani. A késleltetési időn belül a riasztás törölhető az enter vagy bármelyik oldal gomb pillanatnyi megnyomásával!

Figyelem! Az elesési riasztás bekapcsolása során megnövekedhet a nem indokolt riasztások száma, mivel a hirtelen kéz és testmozdulatok is riasztást válthatnak ki. E funkciót használata során fontos a megfelelő érzékenység beállítása!

**Device Language and time zona** – nyelv kínai vagy angol, a magyar időzóna jelenleg télen +1, nyáron +2

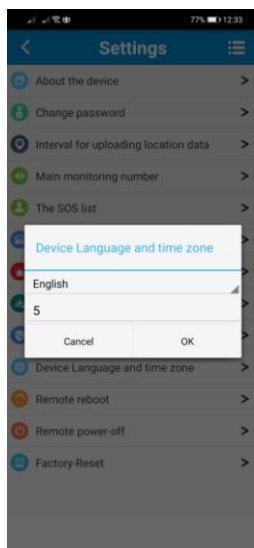


**Timing switch** - időzített kis és bekapcsoló –nem javasoljuk használni

**Remote reboot** – a készülék távolról történő újra indítása


**Remote power-off** – a készülék távoli leállítása. Bekapcsolás csak a készülék ON-OFF gombjával lehetséges.

**Factory-Reset** – a gyári beállítások visszaállítása

### 3.2 Helyzet meghatározás / Nyomkövetés

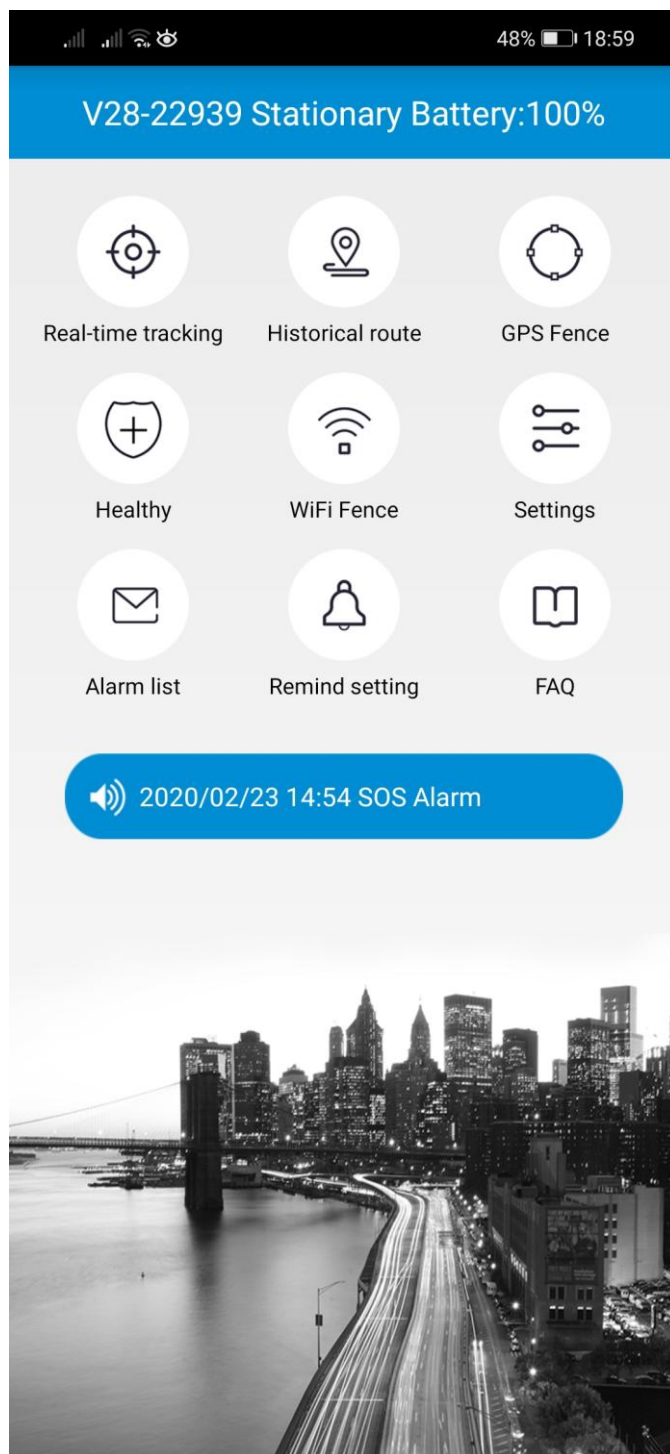


A fenti főoldalból kiindulva válassza (klikk) a Real-time tracking memű pontot.

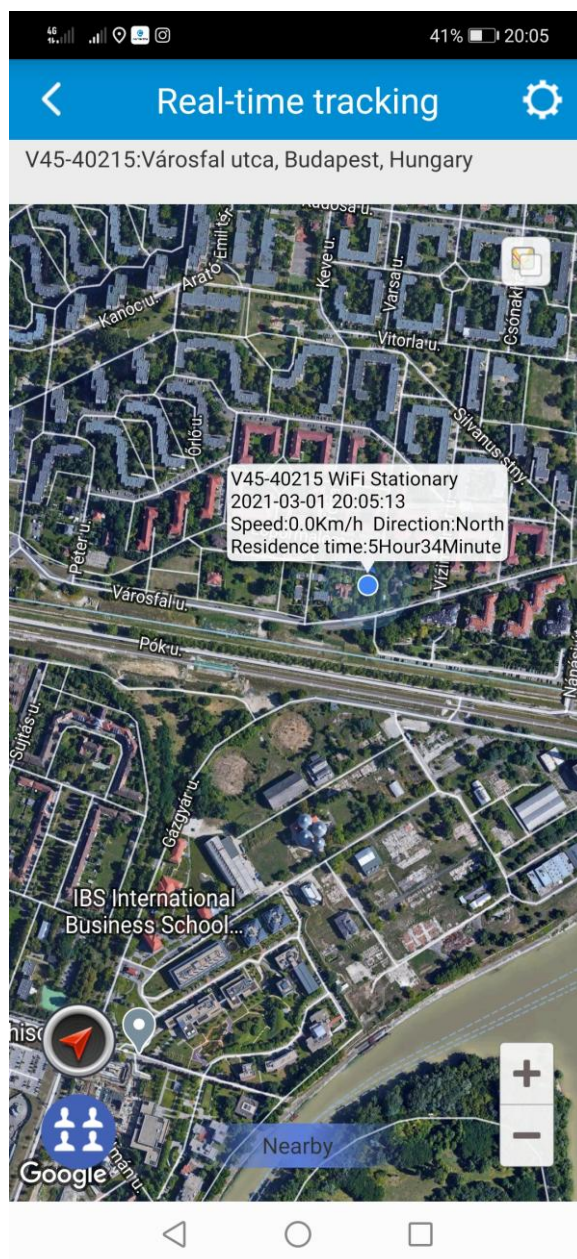

A készülék pozíciója két térkép változatban tekinthető meg. A választó gomb a térképmező jobb felső sarkában található. A pozíció jelölőnyila feletti mezőben a legfontosabb adatok olvashatók.

A Real-time tracking szövegtől jobbra látható fogaskerék ikonra kattintva pedig két lehetőség nyílik meg: 1. **Single refresh** a pozíció adatok prompt egyszeri frissítése, 2. **Interval for uploading** almenűben pedig kiválasztással választhatjuk ki a GPS pozíció adatok automatikus frissítési időközét. Javaslatunk, amennyiben nem szükséges a folyamatos pozícióregisztrálás és nyomkövetés, válasszon 10 perc vagy annál is nagyobb időközt, ezzel kíméli az eszköz akkumulátorát.

A visszamenőlegesen a megtett útvonal a „Historical route” menüben lehetséges.  
A „kültéri” láthatatlan kerítés (Geofence) az „Add geofence” menüben lehetséges.

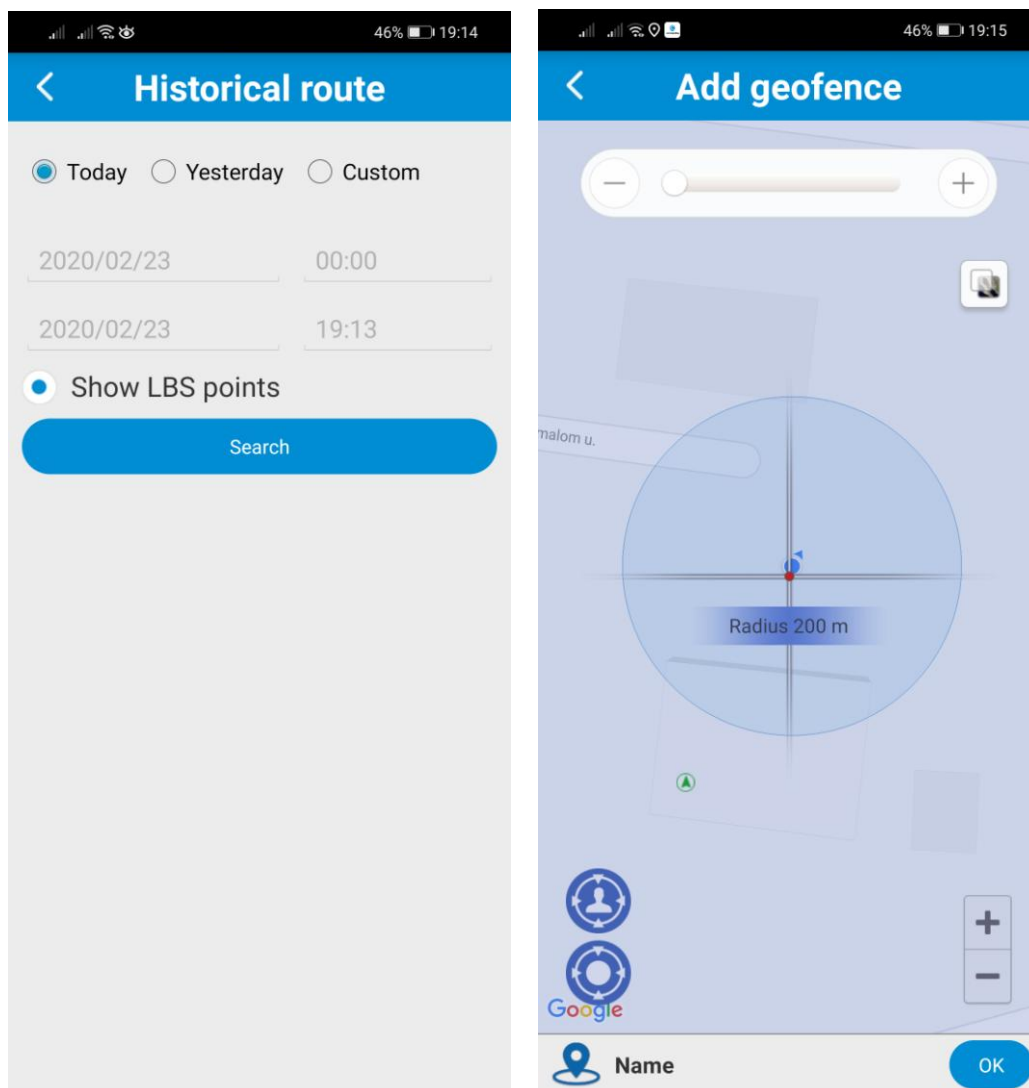

A készülék lehetőséget ad az ún. GPS és WiFi kerítések rögzítésére is, amelyek beállítása a „GPS” Fence” és a „WiFi Fence” menüben lehetséges. Itt a + jelre kattintva az „Add Wifi Fence” almenüben nevesíthetők és jelölhetők ki azok a WiFi-router körzetek melyekkel a WiFi láthatatlan kerítés körzetek kijelölhetők.

### 3.3 Egészségügyi (Healthy) megfigyelés funkciók

Hangsúlyozandó, hogy a készülék nem orvosi mérőműszer, csak tájékoztató adatokat szolgáltat és nem helyettesíti az orvosi ellátás keretében megfelelő szakember által speciális orvosi eszközökkel végzett mérést!

A főmenü oldalán válassza (klikk) a „Healthy” almenüt és igény szerint léphet tovább a **'Heart rate and blood pressure'** (szívverés és vérnyomás), **'Health Step'** (mozgás aktivitás), **'Pill Alarm'** (gyógyszerezési vagy más időpontra figyelmeztetés).

**'Blood oxygen' (véroxigén)** szint mérés a vérnyomás és szívverésszám mérés keretében történik!

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szívverésszám, vérnyomás és véroxigén méréskor csak megfelelően felcsatolt készülék esetén várható értékelhető eredmény.

További lehetőség még a gyógyszerezési időpontokra figyelmeztetés (Pill Alarm) funkció beállíthatósága.

**3.4 Conversation (társalgás)** – három lehetőséget nyújt a menü. 1. Call to Tracker (normál telefonhívás), 2. Voice Talk (rövid hangüzenet (voice chat), 3. Voice monitoring (behallgatás)

### 3.5. Alarm list (riasztási eseménytár)

A listában a legfontosabb riasztási események jelennek meg időrendi sorrendben.



| Alarm list        |                  |
|-------------------|------------------|
| V28-22939         | 2020/02/23 14:54 |
| SOS Alarm         |                  |
| V28-22939         | 2020/02/23 14:42 |
| SOS Alarm         |                  |
| V28-22939         | 2020/02/23 14:39 |
| SOS Alarm         |                  |
| V28-22939         | 2020/02/23 11:38 |
| Fall Alarm        |                  |
| V28-22939         | 2020/02/20 11:19 |
| Fall Alarm        |                  |
| V28-22939         | 2020/02/20 11:19 |
| SOS Alarm         |                  |
| V28-22939         | 2020/02/18 12:07 |
| Offline           |                  |
| V28-22939         | 2020/02/18 08:08 |
| Low battery Alarm |                  |
| V28-22939         | 2020/02/15 15:29 |
| Fall Alarm        |                  |
| V28-22939         | 2020/02/14 12:12 |
| SOS Alarm         |                  |

### 3.6 Remind setting (Beállítás emlékeztető)

Annak beállítása, hogy a legfrissebb riasztási információkat az alkalmazás megkapja-e vagy sem. Javaslatunk, hogy mindig és mindegyik sor legyen ON állásban!

### 3.7 Photo (Fényképezés)

A Photo ikonra és azon belül a Photo sorra kattintva lehetőség van egy HD minőségű fénykép elkészítésére a karórán applikált kamera segítségével. Az előlő oldal bal felső sarokban található a kamera. **Ez a funkció egyes esetekben és egyes országokban nem elérhető!**

**3.8 FAQ** – A legfontosabb felmerülő kérdések és válaszok angol nyelven.

**3.9 LOG OUT** – A főmenü oldalt balra vagy jobbra elhúzva lép a log out oldalra (kilépés), ahol a funkció megerősítése után kilép a programból. Figyelem! Ha kilép, az alkalmazás nem fogadja a készülékről érkező riasztásokat és az alkalmazás nem menedzseli a készüléket.

## 4.0 A készülék ismertetése

### 4.1 Az üzembe helyezés lépései

Miután kicsomagolta a készüléket első lépésként tegye töltőre. A töltési folyamatot a készülék képernyője jól látható módon jelzi! A kellő töltöttség elérésekor (ez kb. ½ óra) megnyomva a készülék jobb oldalán található KI-BE kapcsoló gombot a készülék jól érzékelhető módon bekapcsol.



ON-OFF gomb

A bekapcsolás után megjelenik a kezdő képernyő, amely lehet hagyományos analóg, vagy lehet digitális. A hagyományos képernyőről a digitálisra váltás a képernyő balról jobb irányba „húzásával” lehetséges. Lásd a szemléltető videót! A digitális képernyő az alábbi fontos információkat tartalmazza (felülről lefele, balról jobbra):

- adatkapcsolat megléte és módja, például G, 2G, 4G
- akkumulátor töltöttség ikonja,
- dátum (nap/hó/év)
- óra és perc
- nap angol rövidítéssel

Amennyiben az operáció közben a képernyő energiatakarékossági okból elsötétül, az ON-OFF gombot egy pillanatra megnyomva a képernyő láthatóvá válik.

A digitális nyitó képernyőről a funkció menükre váltani a képernyő balról jobbra történő határozott húzásával lehetséges. A funkció menük a következők:

- Phone book (telefonkönyv),
- Voice chat (rövid hangüzenet),
- Dial (billentyűzeti hívás),
- Camera (fénykép),
- APP Down (alkalmazás QR kód),
- Gallery (Fénykép album)
- Settings (beállítások)
- Step (lépésszámláló),
- HR & BP (szívverés és vérnyomás),
- Alarm (Ébresztő óra),
- Sedentary (tevékenység emlékeztető),
- Volume (Készülék hangerő),

Az adott funkció menübe belépni képernyőre kattintással lehetséges. A visszalépés az adott pozícióból, menüből pedig a képernyő alján látható karika ikonra (vissza gomb) kattintva lehetséges.

A digitális képernyőt fentről lefele húzva, három gyors menü érhető el, melyek

- fogaskerék - beállítások
- hangszóró - hangerő
- táska – alarm, stopper

Az e menü pontokban található lehetőségeket tanulmányozás után, igény szerint javasoljuk használni.

## **4.2 SOS hívás**

A készülék jobb oldalán található SOS gomb néhány másodpercig történő megnyomásával történik. A gombot addig kell nyomni, amíg a figyelmeztető hang és/vagy rezgés nem hallatszik. Ekkor a gomb elengedhető.

## **4.3 Normál hívás telefonkönyvből**

A telefonkönyvbe az alkalmazáson keresztül felvitt név szerint számok kiválasztással hívhatók.

## 4.4 A készülék felhívása

A készülék felhívása a szokásos módon történik. Amikor hívja a készüléket, a fentiekben leírt (Answer mode) beállítás szerint fogadja a hívást.

## 4.5. Elesésriasztás

Az alkalmazáson élesített elesés funkció (Falldown alarm - ON, Fall down level – érzékenység) aktiválása után a készülék feltételezhető elesés érzékelésekor automatikusan, néhány másodperc késleltetéssel riaszt, hív és/vagy üzenetet küld. A riasztási késleltetés idején belül a téves riasztás blokkolható a CANCEL szövegre történő tappintással. Kérjük, tesztelje a funkciót éles használat előtt!

Javaslatunk, hogy élesítse a funkciót, állítsa az érzékenységet közepes értékre (1-6 érték közt pld. 3). Ejtse le a készüléket egy nagyon puha felületre (pld. dunyhára) kellő magasságból és szögben.

## 4.6. Egészségügyi megfigyelés (HR, BP, Blood oxigen)

A funkció elérhető az alkalmazáson keresztül és a készüléken közvetlen is. A méréshez legyen a készülék a csukló felett megfelelően felcsatolva (ne forogjon el, de ne legyen túl szoros sem). Üljön le, fektesse az alkart vízszintesen, kényelmesen egy asztalra.

**Mérés a készülékről:** válassza ki a HR&BP menüt, tappintson a képernyőre, majd a Start szövegre kattintva indítsa a mérést. A mérés alatt ne mozogjon, várja meg az eredményt.

**Mérés az alkalmazásból indítva:** Egyeztesse a mérést a készülék viselőjével. Elhelyezkedés, mint fentebb. Válassza ki az alkalmazásban a Healthy menü pontot, lépjen be, válassza a Heart rate and blood pressure sort, lépjen tovább, kattintson a fogaskerék ikonra, válassza Heart rate and blood pressure measurement sort, majd indítsa a mérést. Várjon az eredményre, ez néhány perc.

## 4.7 A készülék hardver beüzemelése (amennyiben utólag SIM kártyát cserélne)

A készüléket gratisz SIM kártyával beüzemelve, előzetesen tesztelve szállítjuk. Amennyiben a SIM kártyát a későbbiek folyamán, bármely okból cserélné, kérjük, előzetesen hívjon bennünket, segítünk.

## 5. Hibajelenségek és teendők

| Hiba jelenség                                                                                 | Teendő                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem jelenik meg az APP google-térképen                                             | Ellenőrizze, hogy a<br>1. SIM kártya megfelelő-e<br>2. APN beállítás megfelelő-e<br>3. SIM kártya tartalmaz-e adategyenleget                                                                     |
| A készülék folyamatosan offline módban jelenik meg az APP-n                                   | Ellenőrizze, hogy a<br>1. SIM kártya működik-e<br>2. GPRS adatkapcsolat van-e vagy be van e kapcsolva<br>3. SIM kártya egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)                            |
| Hely pozíció pontatlan                                                                        | Győződjön meg a pozícionálás módjáról és vegye figyelembe:<br>1. GPS, Wifi 5-15 m,<br>2. GSM (LBS) 100-1000 m (az adott GSM hálózat függvénye!)                                                  |
| A készülék nem fogad bejövő hívást                                                            | Ellenőrizze, hogy a<br>1. SIM kártya működik-e<br>2. SIM kártya GSM egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)                                                                               |
| A készülék nem hív az SOS gomb megnyomására                                                   | Ellenőrizze, hogy a<br>1. SIM kártya működik-e<br>2. SIM kártya GSM egyenleg fel van –e töltve (feltöltős kártya!)<br>3. Ellenőrizze a beállításokat                                             |
| A készülék akkumulátor túl hamar lemerül                                                      | Ellenőrizze az „Interval for uploading location data” beállításokat<br>1. Javaslat: a beállítás legyen a 10 perc<br>2. Ha nincsen szükség helymeghatározásra, állítsa energiatakarékos 12 órára. |
| Az akku lemerült, a készülék kikapcsolt. Újra lett töltve az akku, de a készülék nem működik. | Az ON gombbal kapcsolja be.                                                                                                                                                                      |

## 6. Készülék be- kikapcsolása

Fontos! Amikor a készülékben működőképes SIM kártya van behelyezve a készülék csak távolról az alkalmazás „Remote power-off” funkció használatával vagy a készüléken a Gyors menüben (Power off) kapcsolható ki! Amennyiben az akkumulátora teljesen lemerül, a készülék természetesen lekapcsol. Ilyenkor az akkumulátort fel kell tölteni és az SOS gombot folyamatosan nyomni kell, addig (5-7 sec) amíg a készülék jól látható bejelentkező dallamot nem ad. Amennyiben a készülékben nincsen SIM kártya, ki lehet kapcsolni a készüléket az SOS gomb 5-7 sec ideig történő nyomásával. A készülék elbúcsúzik! Amennyiben a készüléket töltőre helyezzük, az akkumulátor egy bizonyos töltöttsége szintje esetén a készülék automatikusan bekapcsol (ha ki volt kapcsolva!) Figyelem az alkalmazásból a készülék kikapcsolható illetve újra indítható, de bekapcsolni nem lehet (csak közvetlenül a készülékről!).

## 7. Fontos megjegyzések

Használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy biztosítsa az eszköz helyes és biztonságos használatát;

Amikor esetleg SIM kártyát kell cserélnie először kapcsolja ki a készüléket, tegye be a SIM kártyát, majd kapcsolja be a készüléket.

A készülék csak megfelelő GSM/2G/3G/4G lefedettség mellett működik megfelelően.

Használat előtt a készüléket 2-3 órán keresztül kell tölteni a tartozék töltővel.

A készenléti idő a beállítások függvényében kb. 2-3-4 nap.

Ez az eszköz cseppenő víz ellen védett, tehát víz alá ne merítse!

Kérjük, hagyja távol a készüléket tűztől, szélsőséges hőtől, fagyos hidegtől és más szélsőséges környezettől.

Az eszköz GPS/GSM/GPRS/2G/3G/4G telekommunikációs hálózati rendszerben működik, melyek nem megfelelő működése esetén a készülék sem fog a leírt működési paraméterei szerint működni. Előbbiek hibás működéséből adódó műszaki és funkcionális problémák, hibák a vis maior esetét képezik, az ezekből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A gyártó-fejlesztő fenn tartja magának a jogot, hogy minden külön értesítés nélkül a készüléket időközben módosítsa, fejlessze, az alkalmazáson változtatásokat eszközöljön. Amennyiben jelen leírás és a tényleges működés között eltérést tapasztal, kérjük, jelezze felénk az [info@zoom.co.hu](mailto:info@zoom.co.hu) e-mail címen. KÖSZÖNJÜK!

Budapest, 2023. április